

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort
3800VB397

postzegel
niet nodig

Overzicht

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per	ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Conform 2 huidplak SoftFlex						Conform 2 met flexibele plakrand FlexWear					
Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst						Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
23200		13-20 mm	35 mm	●	5	33500		13-20 mm	35 mm	●	5
24200		13-30 mm	45 mm	●	5	34500		13-30 mm	45 mm	●	5
24220		20 mm	45 mm	●	5	34520		20 mm	45 mm	●	5
24225		25 mm	45 mm	●	5	34525		25 mm	45 mm	●	5
24230		30 mm	45 mm	●	5	34530		30 mm	45 mm	●	5
25200		13-40 mm	55 mm	●	5	35500		13-40 mm	55 mm	●	5
25235		35 mm	55 mm	●	5	35535		35 mm	55 mm	●	5
25240		40 mm	55 mm	●	5	35540		40 mm	55 mm	●	5
27200		13-55 mm	70 mm	●	5	37500		13-55 mm	70 mm	●	5
Huidplak post-operatief, zelf te knippen/voorgestanst						Convex huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
38100		13-89 mm	102 mm	●	5	34600		13-25 mm	45 mm	●	5
38300	Ileo, transparant, set	13-89 mm	102 mm	●	5	34620		20 mm	45 mm	●	5
38470	Urozakjes, niet steriel		70 mm	●	20	34622		22 mm	45 mm	●	5
38570	Uro, set, steriel	13-55 mm	70 mm	●	5	34625		25 mm	45 mm	●	5
Conform 2 huidplak FormaFlex						35600		13-38 mm	55 mm	●	5
34700	Vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	●	5	35629		29 mm	55 mm	●	5
35700	Vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	●	5	35632		32 mm	55 mm	●	5
37700	Vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	●	5	37600		13-51 mm	70 mm	●	5
Conform 2 uro huidplak FlexWear						Huidplak post-operatief, zelf te knippen géén start-opening					
33200		13-20 mm	35 mm	●	5	38500		0-89 mm	102 mm	●	5
34200		13-30 mm	45 mm	●	5	Ileostomie zakjes					
34225		25 mm	45 mm	●	5	AF300 filter en Lock 'n Roll sluiting					
34230		30 mm	45 mm	●	5	24743	Symmetrisch, mini, beige	45 mm	●	30	
35200		13-40 mm	55 mm	●	5	25743	Symmetrisch, mini, beige	55 mm	●	30	
35235		35 mm	55 mm	●	5	23750	Anatomisch, midi, beige	35 mm	●	30	
35240		40 mm	55 mm	●	5	24750	Anatomisch, midi, beige	45 mm	●	30	
Convex						25750	Anatomisch, midi, beige	55 mm	●	30	
24300		13-25 mm	45 mm	●	5	24850	Anatomisch, midi, transparant	45 mm	●	30	
24320		20 mm	45 mm	●	5	25850	Anatomisch, midi, transparant	55 mm	●	30	
24322		22 mm	45 mm	●	5	23760	Symmetrisch, maxi, beige	35 mm	●	30	
24325		25 mm	45 mm	●	5	24760	Symmetrisch, maxi, beige	45 mm	●	30	
25300		13-38 mm	55 mm	●	5	24860	Symmetrisch, maxi, transparant	45 mm	●	30	
25329		29 mm	55 mm	●	5	25760	Symmetrisch, maxi, beige	55 mm	●	30	
25332		32 mm	55 mm	●	5	25860	Symmetrisch, maxi, transparant	55 mm	●	30	
25335		35 mm	55 mm	●	5	27760	Symmetrisch, maxi, beige	70 mm	●	30	
27300		13-51 mm	70 mm	●	5	27860	Symmetrisch, maxi, transparant	70 mm	●	30	

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl




HOL489/5-0113



Conform 2
Ileostomie

Tweedelig opvangsysteem met
normale of convexe huidplak



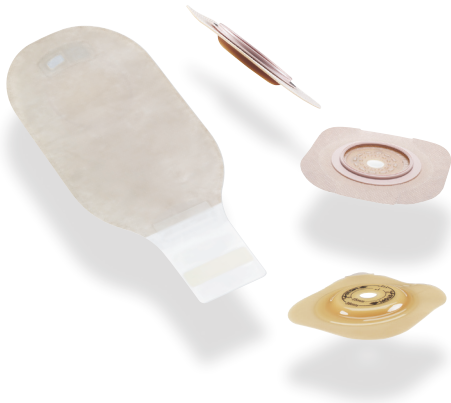

U kunt er elke dag op vertrouwen

- Bewegingsvrijheid
- Gemakkelijk in het gebruik
- Minder opbollen en geurtjes door AF300 filter
- Discreet
- Eenvoudig te legen
- Extra veilig dankzij de Lock 'n Roll Microseal sluiting

Praktische tips

Op Conform 2 Ileostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Wees voorzichtig met koolzuur, noten en scherpe kruiden. Ook dit is een kwestie van proeven en proberen.

Kleding

- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.



Verwijderen van de huidplak en het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het bijgeleverde afvalzakje.

2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.

3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van de huidplak en het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak en het opvangzakje tussen de handen of onder de kleding. Verwijder de beschermfolie.

5. Vouw de huidplak dubbel en breng deze van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 mm bedragen.

6. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.

Legen opvangzakje met de Lock 'n Roll Microseal sluiting

7. De transparante flap vanuit het midden naar boven openen.
8. Reinig en droog de binnenkant van het uiteinde van het zakje.
9. Rol het uiteinde van het zakje strak op.
9. Trek de transparante flap zo ver mogelijk uit om te sluiten.
9. Druk de sluiting vanuit het midden naar buiten toe dicht.

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen

De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

Stuurt u mij een gratis proefpakket van:

- Moderna Flex Ileostomie (1-delig)
- Moderna Flex ovaal ileostomie (1-delig)
- Conform 2 Ileostomie (2-delig)
- Conform 2 Ileostomie met flexibele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en leveringslijst omvatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, aanvaardt u dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met andere bedrijven die producten of diensten aanbieden (zoals leveranciers, distributiepartners en anderen) om, namens Hollister, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Hollister's producten voor de behandeling van uw aandoening. Hollister zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520352, maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, of door een email te sturen aan klantenservice@hollister.com.

Naam:	MV
Adres:	
Postcode/plaats:	
Telefoon:	
E-mail:	
Mijn stomamaat is:	mm
Ik gebruik nu:	

U kunt deze antwoordkaart ook in een orgelafgekeerde envelop sturen naar: Hollister bv, Antwoordnummer 397, 3800 GE Amersfoort