
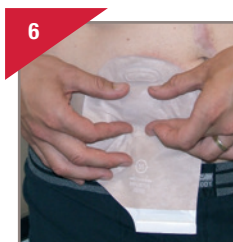
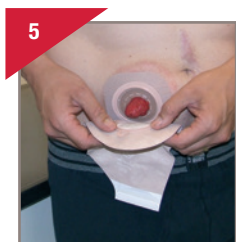
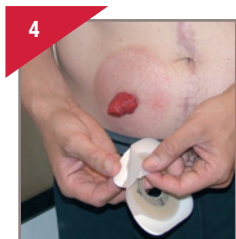
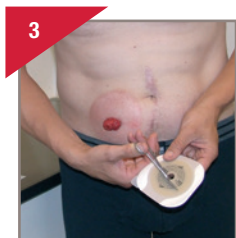


Instructie

Verwisselen 2-delig materiaal, open systeem

Vorbereiden, materiaal klaar leggen:

Huidplak, opvangzakje, vochtige gaasjes, droge gaasjes, afvalzakje, mal, pen, schaar.

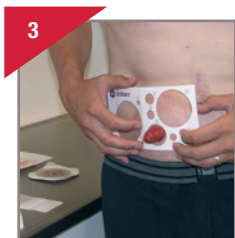

Verwijderen van het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, met behulp van een vochtig gaasje. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak!
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes. Droog de huid door te deppen met een gaasje. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. De huidplak moet voor u op maat gemaakt worden. Met behulp van een passende mal knipt u de opening in de huidplak uit. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 tot 2 mm bedragen.

Aanbrengen van de huidplak en het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak tussen de handen of onder uw kleding. Verwijder de beschermfolie.
5. Breng de huidplak aan. Wrijf rondom uw stoma de huidplak goed aan zodat deze goed aansluit op de huid. Bevestig het opvangzakje.
6. Houd nog even uw hand op de huidplak zodat hij goed kan hechten aan de huid.

Legen opvangzakje met a geïntegreerde sluiting

7. De transparante flap vanuit het midden naar boven openen. Houd het uiteinde van het opvangzakje boven het toilet of een bokaal om het opvangzakje te ledigen.
8. Maak het uiteinde van het opvangzakje schoon.
9. Rol het uiteinde van het zakje strak op tot aan de sluiting. Druk de sluiting vanuit het midden naar buiten.