

Algemene informatie

- Gebruik om onregelmatigheden in de huid op te vullen en zo een vlakker oppervlak rondom de stoma te creëren
- Gebruik om te voorkomen dat ontlasting / urine onder de huidplak terecht komt
- Kan op maat worden geknipt en uitgerekt of op elkaar gestapeld worden om de pasvorm van het stomaopvangsysteem te verbeteren
- Om te zorgen voor een perfecte pasvorm is de CeraRing beschikbaar in 2 diktes, namelijk 2,3 mm en 4,5 mm dik.

Hoe gebruik ik de vlakke Adapt CeraRing?

1. Was en droog uw huid grondig
2. Haal de ring uit de plastic verpakking (figuur 1) en verwijder de beschermfolie van beide kanten (figuur 2)
3. Indien gewenst kunt u de ring kneden / vormen voor het aanbrengen (figuur 3)
4. Kies één van de volgende opties:
 - Breng de ring aan op de klevende kant van de huidplak (figuur 4) of
 - Breng de ring aan op de huid en plaats vervolgens uw stomaopvangmateriaal (figuur 5)
5. Stapel de ringen op elkaar, indien dit nodig is, voor een verbeterde pasvorm (figuur 6)
6. Om de ring(en) te verwijderen: haal deze voorzichtig los van de huid wanneer u uw stomaopvangmateriaal verwisselt.




1. Verwijder uit de plastic verpakking



2. Verwijder aan beide kanten het beschermfolie



3. Kneed voor een betere pasvorm

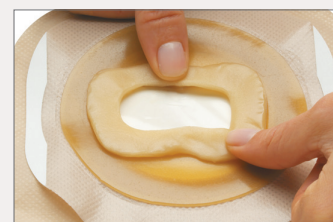

4. Vorm de ring voor een perfecte pasvorm



5. Breng de ring aan op de huid, zorg ervoor dat deze goed rondom de stoma aansluit



6. Stapel de ringen op elkaar, indien dit nodig is, voor een betere pasvorm

Adapt CeraRing - vlak de enige pastaring met ceramide


ondersteunt een gezonde peristomale huid door de juiste pasvorm
aangevuld met de kracht van ceramide

Een pastaring kan een waardevolle aanvulling zijn om de huid rondom de stoma optimaal te beschermen. Bijvoorbeeld bij huidproblemen of voor het opvullen van onregelmatigheden zoals plooiën, kuiltjes in de huid of littekenweefsel. Door een vlakke Hollister Adapt CeraRing te gebruiken komt daar een groot voordeel bij: ceramide.

Veiligheid en zekerheid

Voordelen van de vlakke Adapt CeraRing op een rij:

- De flexibele ring kan worden uitgerekt en gevormd – voor een goede pasvorm rond de stoma
- Helpt lekkage te voorkomen en de huid te beschermen
- Kan de draagtijd van opvangmateriaal verlengen
- Is erosiebestendig – zelfs wanneer deze nat wordt of wordt blootgesteld aan ontlasting / urine
- Biedt het ultieme comfort en gebruiksgemak – de alcoholvrije ringen zijn ontworpen om zacht te zijn voor alle huidtypen.

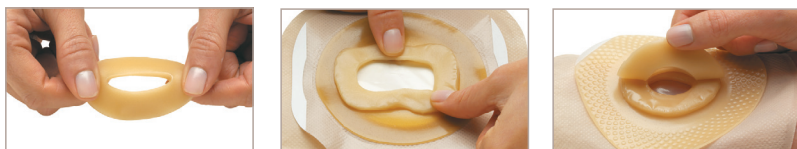

Adapt CeraRing - vlak. Nu beschikbaar in standaard en slim!



Slim
8815

Standaard
8805


ref.nr.	maat	dikte
8805	48 mm	4,5 mm
8815	48 mm	2,3 mm

De werking van ceramide

Ceramide voorkomt dat de huid vocht verliest en beschermt de huid tegen beschadiging en uitdroging. Op deze manier helpt ceramide de peristomale huid gezond te houden vanaf de eerste dag.

Ceramide:

- Ceramide is een lichaamseigen stof
- Ceramide functioneert als 'cement' voor de huid
- Ceramide houdt de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd

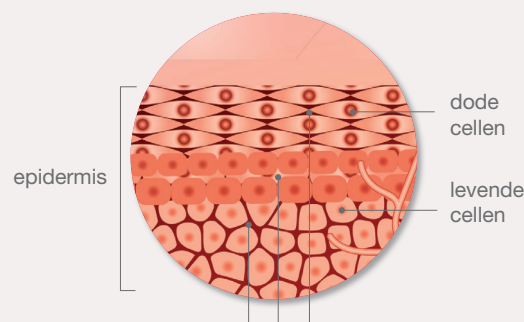

Ceramide en andere lipiden houden de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd

Met de nieuwe vlakke Hollister Adapt CeraRing met ceramide zijn we nog beter in staat de huid rondom de stoma gezond te houden. Voor meer informatie of een proefpakket, bel gratis naar 0800-02 303 52 of stuur een email aan klantenservice@hollister.com.

CE Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo is een handelsmerk van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

© December 2021 Hollister Incorporated
HS323

Hollister BV
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl

