

Algemene informatie

- Verkrijgbaar in ronde en ovale vorm en dus bruikbaar bij diverse vormen stoma's
- Kan op maat worden geknipt of op elkaar worden gestapeld om de pasvorm van het stomaopvangsysteem te verbeteren
- Voorkomt dat de ontlasting / urine onder de huidplak terecht komt
- Gebruik voor:
 - Diverse vormen stoma's (ronde en ovale convexiteit)
 - Diepe convexiteit wanneer deze wordt gebruikt op een convexe huidplak (figuur 1)
 - Flexibele convexiteit wanneer deze wordt gebruikt op een vlakke huidplak (figuur 2)

Hoe maak ik gebruik van de convexe Adapt CeraRing?

1. Was en droog uw huid grondig
2. Verwijder de beschermfolie van beide kanten van de ring (figuur 3)
3. Kies één van de volgende opties:
 - Breng de platte kant van de ring aan op de klevende kant van uw huidplak en breng uw stomaopvangmateriaal aan (figuur 4 & 5)
 - Breng de opstaande kant van de ring aan op uw huid en breng uw stomaopvangmateriaal aan
4. Om de ring te verwijderen: haal deze voorzichtig los van de huid wanneer u uw stomaopvangmateriaal verwisselt.



Figuur 1



Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4



Figuur 5

Adapt CeraRing - convex de enige pastaring met ceramide

ondersteunt een gezonde peristomale huid door de juiste pasvorm
aangevuld met de kracht van ceramide

Een pastaring kan een waardevolle aanvulling zijn om de huid rondom de stoma optimaal te beschermen. Bijvoorbeeld bij huidproblemen of voor het opvullen van onregelmatigheden zoals plooiën, kuiltjes in de huid of littekenweefsel. Door een convexe Hollister Adapt CeraRing te gebruiken komt daar een groot voordeel bij: ceramide.

Veiligheid en zekerheid

Voordelen van de convexe Adapt CeraRing op een rij:

- Helpt lekkage te voorkomen en de huid te beschermen
- Kan de draagtijd van opvangmateriaal verlengen
- Is erosiebestendig – zelfs wanneer deze nat wordt of wordt blootgesteld aan ontlasting / urine
- Biedt het ultieme comfort en gebruiksgemak – de alcoholvrije ringen zijn ontworpen om zacht te zijn voor alle huidtypen.

Voldoet aan de flexibele pasvorm van convexiteit

Het convexe oppervlak van de ring is ontworpen om de pasvorm rondom de stoma te verbeteren. Door de bolling van de ring richting de peristomale huid te plaatsen wordt de diepte van de huidplak vergroot. Dit helpt lekkage, die kan zorgen voor peristomale huidproblemen, te voorkomen.

- Maak de keuze tussen rond of ovaal, gebaseerd op de grootte en vorm van de stoma
- Gebruik de ringen individueel of plaats deze op elkaar voor een op maat gemaakte convexiteit
- Gebruik samen met een vlakke huidplak voor flexibele convexiteit
- Gebruik samen met een convexe huidplak voor een diepere convexiteit die in sommige situaties nodig is



**Adapt CeraRing -
convex, rond**

ref.nr.	maat	Verp. per
89520	20 mm	10
89530	30 mm	10
89540	40 mm	10



**Adapt CeraRing -
convex, ovaal**

ref.nr.	maat	Verp. per
89601	22 mm x 38 mm	10
89602	30 mm x 48 mm	10
89603	38 mm x 56 mm	10


Met de nieuwe convexe Hollister Adapt CeraRing met ceramide zijn we nog beter in staat de huid rondom de stoma gezond te houden. Voor meer informatie of een proefpakket, bel gratis naar 0800-02 303 52 of stuur een email aan klantenservice@hollister.com.

De werking van ceramide

Ceramide voorkomt dat de huid vocht verliest en beschermt de huid tegen beschadiging en uitdroging. Op deze manier helpt ceramide de peristomale huid gezond te houden vanaf de eerste dag.

Ceramide:

- Ceramide is een lichaamseigen stof
- Ceramide functioneert als 'cement' voor de huid
- Ceramide houdt de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd

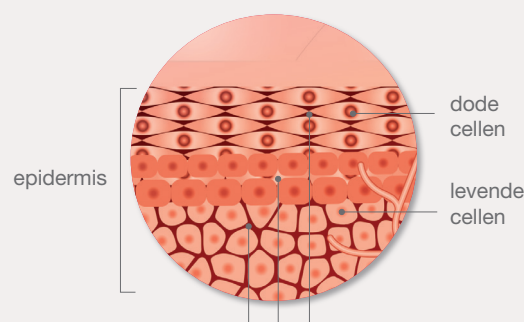

Ceramide en andere lipiden houden de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd

Hollister BV
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl

CE Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo is een handelsmerk van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

© December 2021 Hollister Incorporated
HS324

