


Ontwikkeld
met diepgaande
kennis over
gezonde huid

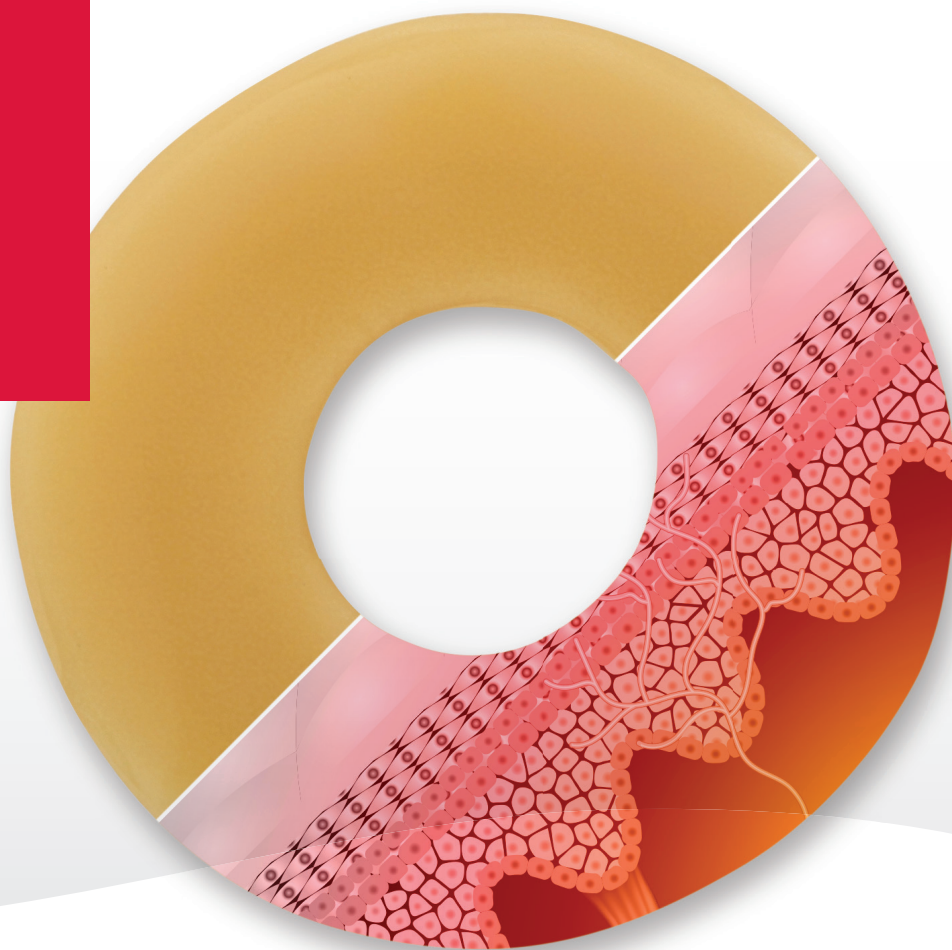

vlakke en convexe variant

Introductie van de nieuwe

Adapt CeraRing™

De enige pastaring met ceramide

ondersteunt een gezonde peristomale huid
door de juiste pasvorm aangevuld met de kracht
van ceramide

Adapt CeraRing – Vlak en Convex

ondersteunt een gezonde peristomale huid door de juiste pasvorm aangevuld met de kracht van ceramide

Een pastaring kan een waardevolle aanvulling zijn om de huid rondom de stoma optimaal te beschermen. Bijvoorbeeld bij huidproblemen of voor het opvullen van onregelmatigheden zoals plooien, kuiltjes in de huid of littekenweefsel. Door een Hollister Adapt CeraRing te gebruiken komt daar een groot voordeel bij: ceramide.

De Hollister Adapt CeraRingen bevatten ceramide, een lichaamseigen stof die van nature aanwezig is in een gezonde huid. Om problemen met en rondom de stoma te voorkomen is een gezonde peristomale huid een voorwaarde.

Naarmate de huid ouder wordt bevat deze minder ceramide. Hierdoor verliest de huid bij het ouder worden meer vocht en biedt deze minder bescherming tegen beschadiging en uitdroging. Naarmate de huid minder ceramide bevat geeft dat in bepaalde gevallen complicaties. Complicaties die verminderd kunnen worden door stomamateriaal te gebruiken waar ceramide in zit.


Met de Adapt CeraRing met ceramide krijgt u dus alle voordelen van ceramide én een betere aansluiting tussen de huid en opvangmateriaal, zowel bij een- als bij tweedelige stomaopvangsystemen.

Circa 50% van de stomadragers heeft op een zeker moment last van peristomale huidproblemen. Ons doel is om u vanaf de eerste dag te helpen een gezonde peristomale huid te behouden.*



Adapt CeraRing™ - vlak

De vlakke Adapt CeraRing helpt lekkage te voorkomen en beschermt de peristomale huid. Bovendien kan deze ring worden uitgerekt en gevormd voor een nog betere pasvorm rond de stoma.

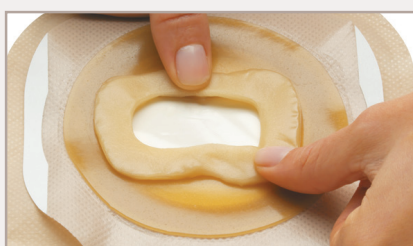

De flexibele ring kan worden uitgerekt en gevormd – voor een goede pasvorm rond de stoma



Slim
8815

Standaard
8805

Adapt CeraRing - vlak. Nu beschikbaar in standaard en slim!

ref.nr.	maat	dikte
8805	48 mm	4,5 mm
8815	48 mm	2,3 mm




De werking van ceramide

Ceramide voorkomt dat de huid vocht verliest en beschermt de huid tegen beschadiging en uitdroging. Op deze manier helpt ceramide de peristomale huid gezond te houden vanaf de eerste dag.

Ceramide:

- Ceramide is een lichaamseigen stof
- Ceramide functioneert als 'cement' voor de huid
- Ceramide houdt de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd

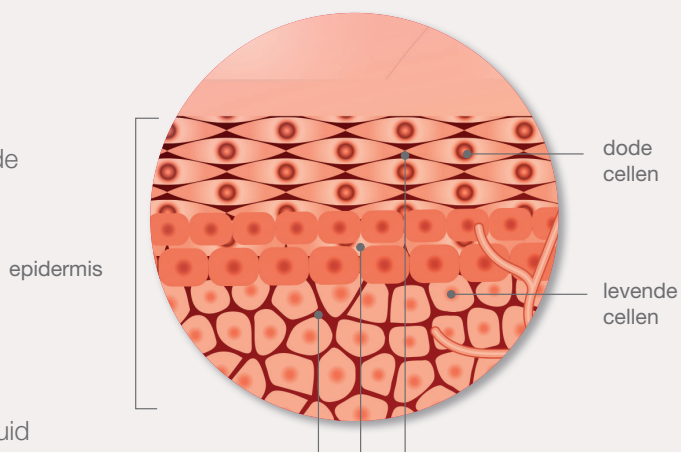

Ceramide en andere lipiden houden de cellen van de opperhuid bij elkaar, waardoor een waterdichte, beschermende laag wordt gevormd


Veiligheid en zekerheid van Adapt CeraRing

De Adapt pastaringen worden al meer dan 10 jaar gebruikt in de stomazorg. Ze helpen lekkage te voorkomen, beschermen de huid en kunnen in sommige gevallen de draagtijd van opvangmateriaal verlengen. Daarbij zorgt de kracht van ceramide voor ondersteuning bij het gezond houden van de peristomale huid.



De voordelen op een rij:

- Helpt lekkage te voorkomen en de huid te beschermen
- Kan de draagtijd van opvangmateriaal verlengen
- Is erosiebestendig – zelfs wanneer deze nat wordt of wordt blootgesteld aan ontlasting / urine.
- Biedt het ultieme comfort en gebruiksgemak – de alcoholvrije ringen zijn ontworpen om zacht te zijn voor alle huidtypen.

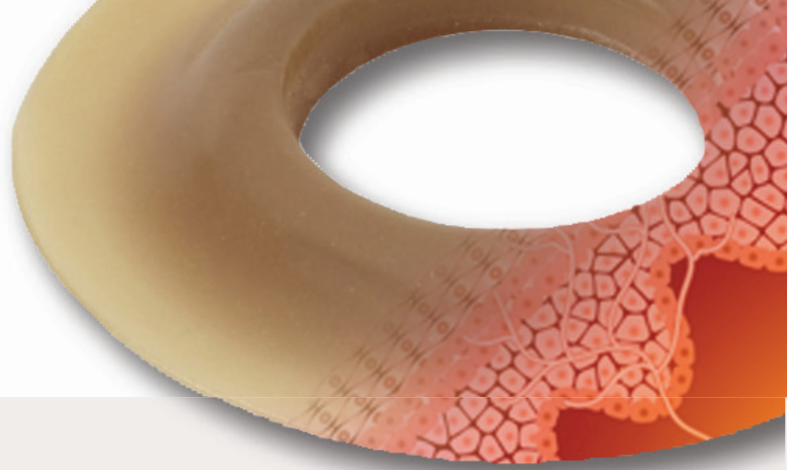

Adapt CeraRing™ - convex

Bij dieper liggende of verzonken stoma's wordt de convexe Adapt CeraRing toegepast. Door gebruik te maken van deze pastaring ontstaat een betere aansluiting tussen huidplak en huid. Bovendien zorgt de kracht van ceramide voor ondersteuning bij het gezond houden van de peristomale huid.

Voldoet aan de flexibele pasvorm van convexiteit

Het convexe oppervlak van de ring is ontworpen om de pasvorm rondom de stoma te verbeteren. Door de bolling van de ring richting de peristomale huid te plaatsen wordt de diepte van de huidplak vergroot. Dit helpt lekkage, die kan zorgen voor peristomale huidproblemen, te voorkomen.

- Maak de keuze tussen rond of ovaal, gebaseerd op de grootte en vorm van de stoma
- Gebruik de ringen individueel of plaats deze op elkaar voor een op maat gemaakte convexiteit
- Gebruik samen met een vlakke huidplak voor flexibele convexiteit
- Gebruik samen met een convexe huidplak voor een diepere convexiteit die in sommige situaties nodig is

Adapt CeraRing - convex, rond



ref.nr.	maat	Verp. per
89520	20 mm	10
89530	30 mm	10
89540	40 mm	10

Adapt CeraRing - convex, ovaal



ref.nr.	maat	Verp. per
89601	22 mm x 38 mm	10
89602	30 mm x 48 mm	10
89603	38 mm x 56 mm	10

Ervaar het verschil met Adapt CeraRing

Voor meer informatie of een proefpakket, bel gratis naar 0800-02 303 52, stuur een email aan klantenservice@hollister.com of neem contact op met jouw Hollister accountmanager.

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Hollister stomazorg is gespecialiseerd in het leveren van producten die een optimale pasvorm hebben om lekkage te voorkomen en met de juiste samenstelling van de huidplak zorgen voor de bescherming en het behoud van een gezonde peristomale huid. De Adapt CeraRing, in vlakke en convexe uitvoering, is het nieuwste aanvullend hulpmiddel in de stomazorg dat ervoor zorgt dat aan deze voorwaarden kan worden voldaan.

Hollister BV
De Brand 28
3823 LJ Amersfoort
www.hollister.nl



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo, Adapt, Adapt CeraRing zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

© 2016 Hollister Incorporated
923031-716