


# Gebruiksaanwijzing

## Access port




Artikel nr. 9779


### Vorbereitung: werk zo steriel of schoon mogelijk

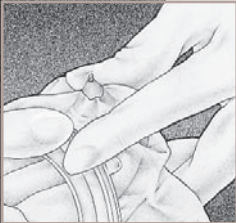

**1.** Bepaal de plaats waar de Access port aangebracht dient te worden. Plaats het blauwe hoedje, met de binnenring eromheen, aan de binnenkant van de folie van het opvangzakje. Druk de punt van het blauwe hoedje door de folie van het opvangzakje.

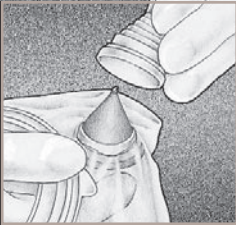

**2.** Plaats het transparante, getrapte hoedje, met de buitenring over het blauwe hoedje en de folie.

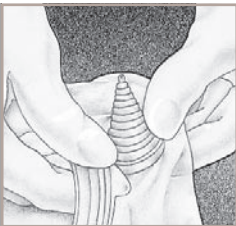


**3.** Druk de binnenring en de buitenring in elkaar.




**4.** Verwijder het blauwe hoedje vanuit de binnenkant van het opvangzakje.



**5.** Knip het getrapte hoedje op de gewenste grootte.

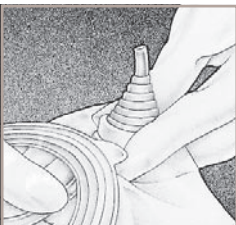

**6.** Breng de drain of katheter door de Access port via de binnenkant van het opvangzakje.

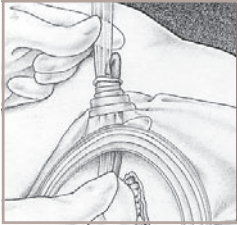

7. Begeleid de drain of katheter door de Access port totdat de gewenste lengte is bereikt.



8. Sluit de drain of katheter aan op een daarvoor bestemde opvangzak.

### **Belangrijk**

De Access port kan niet uit de folie verwijderd worden zonder de folie ernstig te beschadigen. Bij gebruik van een ballonkatheter kan het luchtventiel op de opvangzak geplakt worden met een pleister.