

# Access Port

Gebruiksaanwijzing



# Hollister Access Port gebruiksaanwijzing

artikelnummer 9779

Vorbereiding: werk zo steriel of schoon mogelijk



1 Bepaal de plaats waar de Access Port geplaatst dient te worden. Breng het blauwe hoedje aan (met de binnenring eromheen), aan de binnenkant van de folie van het opvangzakje. Druk de punt van het blauwe hoedje door de folie van het opvangzakje.



2 Plaats het transparante, getrapte hoedje, met de buitenring eromheen, over het blauwe hoedje en de folie.



3 Druk de binnenring en buitenring in elkaar.



4 Verwijder het blauwe hoedje vanuit de binnenkant van het opvangzakje.

5




Knip het getrapte hoedje op de gewenste grootte.

6




Breng de drain of katheter door de Access Port via de binnenkant van het opvangzakje.

7

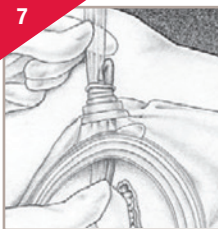

Begeleid de drain of katheter door de Access Port totdat de gewenste lengte is bereikt.

8

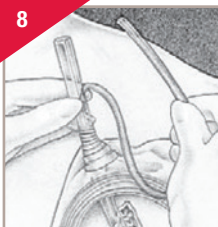

Sluit de drain of katheter aan op een daarvoor bestemde opvangzak.

**Belangrijk:**

De Access Port kan niet uit de folie verwijderd worden zonder de folie ernstig te beschadigen.

Bij gebruik van een ballonkatheter, kan het luchtventiel op de opvangzak geplakt worden met een pleister.

**Wilt u meer weten?**

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

**Hollister bv**

Postbus 2662  
3800 GE Amersfoort  
Tel: (033) 45 01 000  
klantenservice@hollister.com

[www.hollister.nl](http://www.hollister.nl)

