

# Gebruiksaanwijzing

## Horizontaal fixatiesysteem voor drains en sondes



Artikel nr. 9781


### Algemeen

Het horizontale fixatiesysteem voor drains en sondes van Hollister® is een steriel en flexibel hulpmiddel, dat wordt bevestigd aan een FlexWear huidplak. Het fixatiesysteem kan diverse modellen katheters, drains en sondes stabiliseren en vastzetten. Het is geschikt voor drains en sondes met CH 5 t/m 40. Het horizontale fixatiesysteem voor drains en sondes beschermt de huid van de patiënt op drie manieren:


- Het fixatiesysteem maakt het vastzetten van bepaalde sondes aan de huid met hechtingen onnodig.
- Het fixatiesysteem beschermt de huid rondom de sonde.
- Het fixatiesysteem minimaliseert de beweeglijkheid van de sonde en voorkomt daardoor ongemak en vergroting van de sondeopening.

### Waarschuwing

Om de juiste kleefkracht te verkrijgen en de kans op infectie te helpen verminderen, niet hergebruiken.

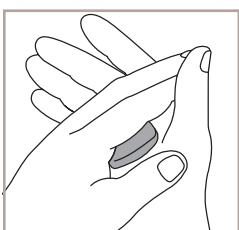


1. Alvorens het fixatiesysteem aan te brengen, moet u de huid van de patiënt met lauwwater wassen. Spoel de huid goed af en laat die volledig drogen. Gebruik geen lotions of verzachtende huidcrèmes, aangezien de restanten daarvan een goede hechting van de kleeflaag belemmeren.

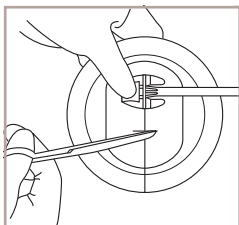


### Aanbrengen van het fixatiesysteem


2. Werk steriel waar dit nodig is; knip een dwarspleet in de beschermlaag loodrecht op de startspleet. Naarmate de doorsnede van de drain of sonde groter is, moet de dwarspleet verder van de drain- of sondehouder gemaakt worden. Indien nodig kan de beschermlaag bijgeknipt worden zodat deze nauwer aansluit op de sonde.

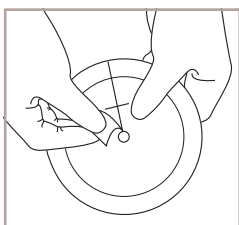


3. Verwijder de beschermstrook van de huidbeschermlaag aan de onderkant van het fixatiesysteem. De beschermstrook niet van de rand van de pleister verwijderen.

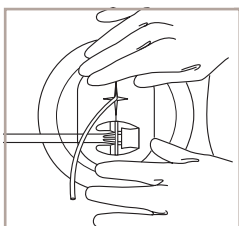


4. Leid de drain of sonde door de startspleet naar de dwarspleet. Houd de pleister zo dat de drain- of sondehouder zich onder de sondeuitgang bevindt. Druk de beschermlaag stevig, maar voorzichtig, op de huid vast en strijk alle plooien glad voor een complete hechting. Verwijder de beschermstrook van de rand van de pleister en druk de pleister op de huid vast.

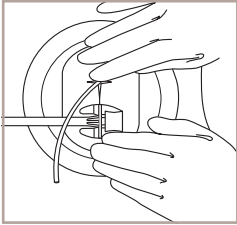

**5.** Leg de drain of sonde boven op het riempje, zodat u zeker weet dat er geen knik in de drain of sonde zit.

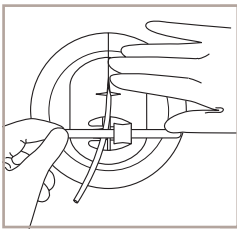


**6.** Haal het riempje over de sonde heen en duw het in de riemopening in de drain- of sondehouder.

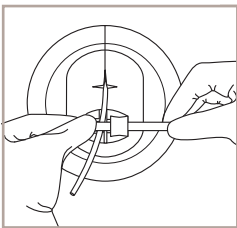

**7.** Trek aan het riempje terwijl u er tegelijkertijd vanaf de andere kant tegen duwt, totdat het goed om de drain of sonde sluit. Zorg dat het fixatiesysteem tijdens deze stap niet losgaat. Voor maximale zekerheid moet het riempje lichte druk op de drain of sonde uitoefenen.


### **Waarschuwing**

Trek het riempje niet te strak aan, omdat de druk dan de drain of sonde zou kunnen afsluiten. Volg de gangbare klinische standaardprocedures bij het plaatsen, controleren en verwijderen van percutane sondes wanneer u het horizontale fixatiesysteem voor drains en sondes gebruikt.

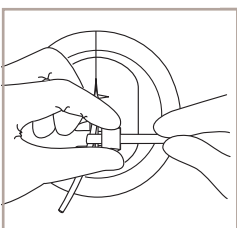

### **Verwijderen van het fixatiesysteem**

**8.** Haal de drain/sonde uit de sondehouder door het riempje terug te duwen terwijl u beide kanten van de gesp ingedrukt houdt. Trek het riempje helemaal terug door de gesp.

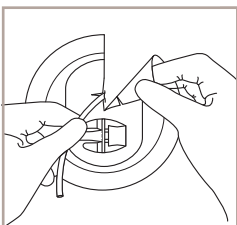

**9.** Trek de beschermlaag en de pleister voorzichtig los van de drain of sonde en van de huid, te beginnen bij de dwarspleet. Houd de sonde met één hand vast en verwijder het fixatiesysteem.



Tel: 0800 52 303 52 (gratis)  
klantenservice@hollister.com  
www.hollister.nl