

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort
3800VB397

postzegel
niet nodig

Overzicht

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
AF300 filter, Lock ´n Roll sluiting, zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
28100	Symmetrisch, mini, beige	15-55 mm	30
28120	Symmetrisch, mini, beige	20 mm	30
28125	Symmetrisch, mini, beige	25 mm	30
28130	Symmetrisch, mini, beige	30 mm	30
28135	Symmetrisch, mini, beige	35 mm	30
28200	Anatomisch, midi, beige	15-55 mm	30
28220	Anatomisch, midi, beige	20 mm	30
28225	Anatomisch, midi, beige	25 mm	30
28230	Anatomisch, midi, beige	30 mm	30
28235	Anatomisch, midi, beige	35 mm	30
28240	Anatomisch, midi, beige	40 mm	30
28300	Symmetrisch, maxi, beige	15-55 mm	30
28320	Symmetrisch, maxi, beige	20 mm	30
28325	Symmetrisch, maxi, beige	25 mm	30
28330	Symmetrisch, maxi, beige	30 mm	30
28335	Symmetrisch, maxi, beige	35 mm	30
28340	Symmetrisch, maxi, beige	40 mm	30
28400	Symmetrisch, maxi, transparant	15-55 mm	30
28500	Anatomisch, midi, transparant	15-55 mm	30

Convex

Symmetrisch, maxi, AF300 filter, Lock ´n Roll sluiting, zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
26800	Beige	15-38 mm	30
26801	Beige	15-51 mm	30
26820	Beige	20 mm	30
26825	Beige	25 mm	30
26830	Beige	30 mm	30
26835	Beige	35 mm	30
26900	Transparant	15-38 mm	30
26901	Transparant	15-51 mm	30
26920	Transparant	20 mm	30
26925	Transparant	25 mm	30
26930	Transparant	30 mm	30
26935	Transparant	35 mm	30

Ovaal

Symmetrisch, maxi, AF300 filter, Lock ´n Roll sluiting, zelf te knippen			
28301	Beige	15-65x75 mm	30
28401	Transparant	15-65x75 mm	30

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
Moderma Flex met flexibele plakrand FlexWear			
Symmetrisch, AF300 filter, Lock ´n Roll, zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
58300	Beige	15-64 mm	30
58320	Beige	20 mm	30
58325	Beige	25 mm	30
58330	Beige	30 mm	30
58335	Beige	35 mm	30
58340	Beige	40 mm	30
58400	Transparant	15-64 mm	30
58420	Transparant	20 mm	30
58425	Transparant	25 mm	30
58430	Transparant	30 mm	30
58435	Transparant	35 mm	30
58440	Transparant	40 mm	30

Convex

Symmetrisch, AF300 filter, Lock ´n Roll, zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
56800	Beige	15-38 mm	30
56801	Beige	15-51 mm	30
56802	Beige	15-25 mm	30
56820	Beige	20 mm	30
56825	Beige	25 mm	30
56830	Beige	30 mm	30
56835	Beige	35 mm	30
56840	Beige	40 mm	30
58845	Beige	45 mm	30
56900	Transparant	15-38 mm	30
56901	Transparant	15-51 mm	30
56902	Transparant	15-25 mm	30
56920	Transparant	20 mm	30
56925	Transparant	25 mm	30
56930	Transparant	30 mm	30
56935	Transparant	35 mm	30
56940	Transparant	40 mm	30
56945	Transparant	40 mm	30

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
Moderma Flex met flexibele plakrand FlexTend			
Symmetrisch, maxi, zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
29000	Beige	15-64 mm	10
29020	Beige	20 mm	10
29025	Beige	25 mm	10
29030	Beige	30 mm	10
29035	Beige	35 mm	10
29040	Beige	40 mm	10
29400	Transparant	15-64 mm	10
29420	Transparant	20 mm	10
29425	Transparant	25 mm	10
29430	Transparant	30 mm	10
29435	Transparant	35 mm	10
29440	Transparant	40 mm	10

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
Convex			
Zelf te knippen/voorgestanste huidplak			
29600	Beige	15-25 mm	10
29601	Beige	15-38 mm	10
29620	Beige	20 mm	10
29625	Beige	25 mm	10
29630	Beige	30 mm	10
29635	Beige	35 mm	10
29640	Beige	40 mm	10
29700	Transparant	15-25 mm	10
29701	Transparant	15-38 mm	10
29720	Transparant	20 mm	10
29725	Transparant	25 mm	10
29730	Transparant	30 mm	10
29735	Transparant	35 mm	10
29740	Transparant	40 mm	10

High Output

AF300 filter, aftapkraan, zachte achterkant, zelf te knippen			
26064	Transparant	15-64 mm	10

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Hollister bv
Postbus 2662
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

HOL489/5-0113



Moderma Flex
Ileostomie

Eéndelig opvangsysteem met
normale of convexe huidplak



Nog meer flexibiliteit en zekerheid

- Huidvriendelijke opvangzakjes
- Ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- discreet dankzij de ritselvrije zakjes
- minder opbollen en geurtjes door AF300 filter
- flexibel bij elke lichaamsbeweging
- onzichtbaar onder kleding (ultraplat systeem!)
- gemakkelijk te legen
- Extra veilig dankzij de Lock 'n Roll Microseal sluiting

Praktische tips

Op Moderma Flex Ileostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het ‘menu’ geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5- 2 l per dag.

Kleding

- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.



Verwijderen van het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak!
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie
5. Vouw de huidplak dubbel en breng deze van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 tot 2 mm bedragen.
6. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.

Legen opvangzakje met de Lock 'n Roll Microseal sluiting

7. De transparante flap vanuit het midden naar boven openen.
8. Reinig en droog de binnenkant van het uiteinde van het zakje.
9. Rol het uiteinde van het zakje strak op.
9. Trek de transparante flap zo ver mogelijk uit om te sluiten.
9. Druk de sluiting vanuit het midden naar buiten toe dicht.

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen
De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

- Stuurt u mij een gratis proefpakket van:**
- Moderma Flex Ileostomie (1-delig)
 - Moderma Flex ovaal Ileostomie (1-delig)
 - Conform 2 Ileostomie (2-delig)
 - Conform 2 Ileostomie met flexbele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

- Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en leveringslijst omvatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, aanvaardt u dat we uw persoonsgegevens kunnen delen met onze vertrouwde partners, leveranciers, distributiepartners en anderen om u, namens Hollister, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Hollisters producten voor de behandeling van uw aandoening. Hollister zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520352, maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, of door een email te sturen aan klantenservice@hollister.com.

Naam:	MV
Adres:	
Postcode/plaats:	
Telefoon:	
E-mail:	
Mijn stomamaat is:	mm
Ik gebruik nu:	

U kunt deze antwoordkaart ook in een orgafrankeerde envelop sturen naar: Hollister bv, Antwoordnummer 397, 3800 GE Anersfoort