

Overzicht

ref. productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp. maat code per

Conform 2 huidplak
SoftFlex

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
23200		13-20 mm	35 mm	● 5	5
24200		13-30 mm	45 mm	● 5	5
24220		20 mm	45 mm	● 5	5
24225		25 mm	45 mm	● 5	5
24230		30 mm	45 mm	● 5	5
25200		13-40 mm	55 mm	● 5	5
25235		35 mm	55 mm	● 5	5
25240		40 mm	55 mm	● 5	5
27200		13-55 mm	70 mm	● 5	5

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak post-operatief, zelf te knippen/voorgestanst					
38100		13-89 mm	102 mm	● 5	5
38300	ileo, transparant, set	13-89 mm	102 mm	● 5	5
38470	Urozakjes, niet steriel		70 mm	● 20	20
38570	Uro, set, steriel	13-55 mm	70 mm	● 5	5

Conform 2 huidplak
FormaFlex

34700	Vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	● 5	5
35700	Vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	● 5	5
37700	Vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	● 5	5

Conform 2 uro huidplak
FlexWear

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
33200		13-20 mm	35 mm	● 5	5
34200		13-30 mm	45 mm	● 5	5
34225		25 mm	45 mm	● 5	5
34230		30 mm	45 mm	● 5	5
35200		13-40 mm	55 mm	● 5	5
35235		35 mm	55 mm	● 5	5
35240		40 mm	55 mm	● 5	5

Convex

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
24300		13-25 mm	45 mm	● 5	5
24320		20 mm	45 mm	● 5	5
24322		22 mm	45 mm	● 5	5
24325		25 mm	45 mm	● 5	5
25300		13-38 mm	55 mm	● 5	5
25329		29 mm	55 mm	● 5	5
25332		32 mm	55 mm	● 5	5
25335		35 mm	55 mm	● 5	5
27300		13-51 mm	70 mm	● 5	5

ref. productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp. maat code per

Conform 2 met flexibele plakrand
FlexWear

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
33500		13-20 mm	35 mm	● 5	5
34500		13-30 mm	45 mm	● 5	5
34520		20 mm	45 mm	● 5	5
34525		25 mm	45 mm	● 5	5
34530		30 mm	45 mm	● 5	5
35500		13-40 mm	55 mm	● 5	5
35535		35 mm	55 mm	● 5	5
35540		40 mm	55 mm	● 5	5
37500		13-55 mm	70 mm	● 5	5

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Convex huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					
34600		13-25 mm	45 mm	● 5	5
34620		20 mm	45 mm	● 5	5
34622		22 mm	45 mm	● 5	5
34625		25 mm	45 mm	● 5	5
35600		13-38 mm	55 mm	● 5	5
35629		29 mm	55 mm	● 5	5
35632		32 mm	55 mm	● 5	5
37600		13-51 mm	70 mm	● 5	5

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Huidplak post-operatief, zelf te knippen géén start-opening					
38500		0-89 mm	102 mm	● 5	5

Colostomie zakjes

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
QuietWear					
Anatomisch en AF300 filter					
44400	Midi, Beige		45 mm	● 30	30
44420	Maxi, Beige		45 mm	● 30	30
45400	Midi, Beige		55 mm	● 30	30
45420	Maxi, Beige		55 mm	● 30	30
47400	Midi, Beige		70 mm	● 30	30
47420	Maxi, Beige		70 mm	● 30	30

ref.	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Anatomisch en AF300 filter					
24410	Mini, beige		45 mm	● 30	30
25410	Mini, beige		55 mm	● 30	30
27410	Mini, beige		70 mm	● 30	30
24400	Midi, beige		45 mm	● 30	30
25400	Midi, beige		55 mm	● 30	30
27400	Midi, beige		70 mm	● 30	30
24500	Midi, transparant		45 mm	● 30	30
25500	Midi, transparant		55 mm	● 30	30
27500	Midi, transparant		70 mm	● 30	30
24420	Maxi, beige		45 mm	● 30	30
25420	Maxi, beige		55 mm	● 30	30
27420	Maxi, beige		70 mm	● 30	30
24520	Maxi, transparant		45 mm	● 30	30
25520	Maxi, transparant		55 mm	● 30	30
27520	Maxi, transparant		70 mm	● 30	30

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



Conform 2 Colostomie

Tweedelig opvangsysteem met
normale of convexe huidplak

HOL489/5-0113

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort

postzegel
niet nodig



Elke dag bewegingsvrijheid en zekerheid

- Bewegingsvrijheid
- Onzichtbaar onder kleding
- Discreet dankzij de geluidsarme folie
- Voldoende opvangcapaciteit
- minder opbollen en geurtjes door AF300 filter

Praktische tips

Op Conform 2 Colostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5- 2 l per dag.

Kleding


- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.

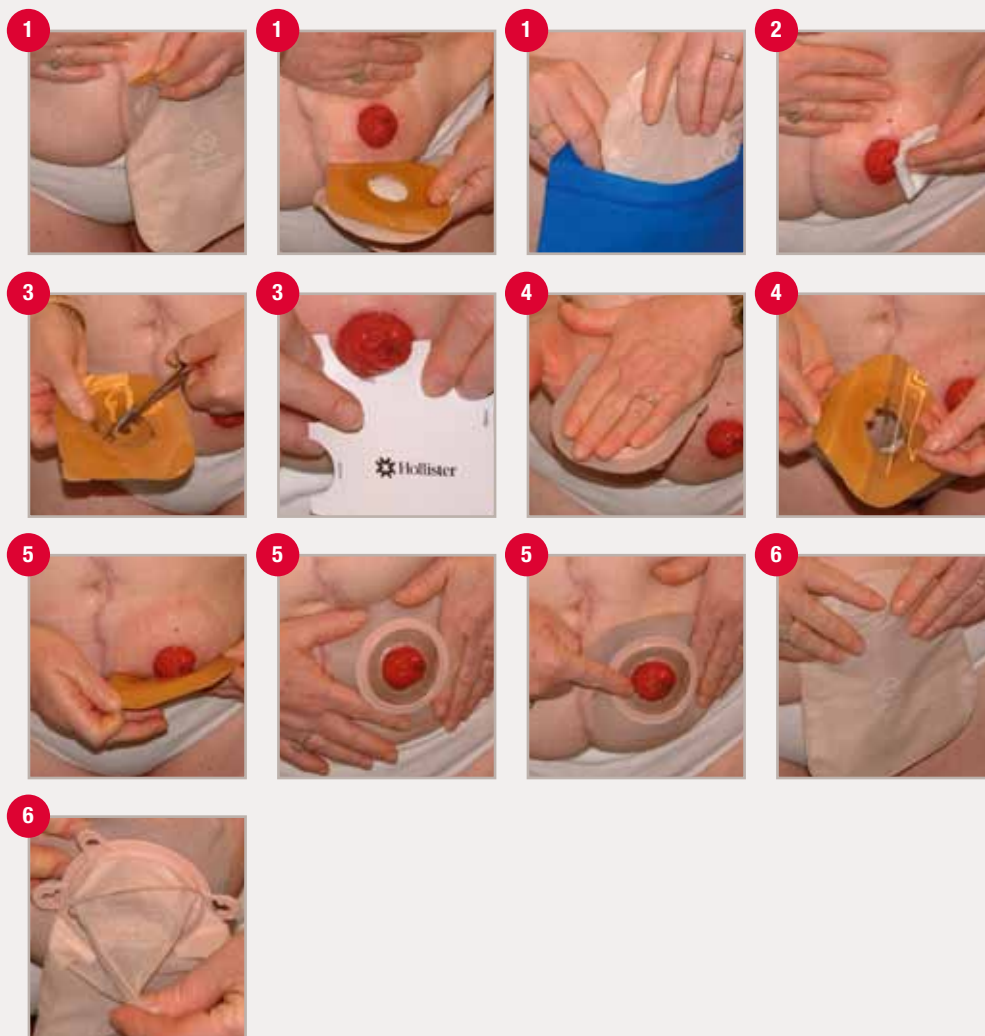

Verwijderen van de huidplak en het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het bijgeleverde afvalzakje.

2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.

3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van de huidplak en het opvangzakje

4. Verwarm de huidplak en het opvangzakje tussen de handen of onder de kleding. Verwijder de beschermfolie.

5. Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag maximaal 1 mm bedragen. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.

6. Klik de ring van het opvangzakje op de flens van de huidplak. Als extra check kunt u licht aan het opvangzakje trekken; zo weet u helemaal zeker dat het goed vastzit.

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen

De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

Stuurt u mij een gratis proefpakket van:

- Moderna Flex Colostomie (1-delig)
- Conform2 Colostomie (2-delig)
- Conform2 Colostomie met flexibele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en leveringslijven bevatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, wordt de informatie die u ons verstrekt, gebruikt voor het verbeteren van onze producten en diensten, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze distributiekanalen en anderszels om u namens Hollister, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Hollister producten voor de behandeling van uw aandoening. Hollister zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt, kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520382, maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, of door een email te sturen aan klantenservice@hollister.com.

Naam:	M/V
Adres:	
Postcode/plaats:	
Telefoon:	
E-mail:	
Mijn stomamaat is:	mm
Ik gebruik nu:	

U kunt deze antwoordskaart ook in een orgelafnameerds enveloppe sturen naar: Hollister B.V. Antwoordnummer 397, 3800 GE Amersfoort