

Overzicht

ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per	ref.	productomschrijving	stomamaat	verp. per
Symmetrisch, maxi, zelf te knippen/voorgestanstehuidplak				Post-operatief			
29100	Beige	15-55 mm	20	Werkluik, zelf te knippen			
29120	Beige	20 mm	20	20070	Sluitklemmen, onsteriel	70 mm	20
29125	Beige	25 mm	20	20110	Sluitklemmen, onsteriel	110 mm	20
29130	Beige	30 mm	20	21070	Sluitklemmen, steriel	70 mm	5
29135	Beige	35 mm	20	21110	Sluitklemmen, steriel	110 mm	5
29500	Transparant	15-55 mm	20				
Convex							
Symmetrisch, maxi, zelf te knippen/voorgestanstehuidplak							
29200	Beige	15-25 mm	10				
29201	Beige	15-38 mm	10				
29220	Beige	20 mm	10				
29225	Beige	25 mm	10				
29230	Beige	30 mm	10				
29235	Beige	35 mm	10				
29300	Transparant	15-25 mm	10				
29301	Transparant	15-38 mm	10				
29320	Transparant	20 mm	10				
29325	Transparant	25 mm	10				
29330	Transparant	30 mm	10				
29335	Transparant	35 mm	10				

Hollister bv
Antwoordnummer 397
3800 VB Amersfoort

postzegel
niet nodig

Hollister stoma. **Gevoel voor detail.**

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com
www.hollister.nl



HOL489/5-0113





U kunt er elke dag op vertrouwen

- huidvriendelijke opvangzakjes
- ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- discreet dankzij de ritselvrije zakjes
- flexibel bij elke lichaamsbeweging
- onzichtbaar onder kleding (ultraplat systeem!)
- het aftapkraantje is gemakkelijk te bedienen
- voldoende opvangcapaciteit

Praktische tips

Op Moderma Flex Urostomie kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Drink voldoende: 1,5- 2 l per dag.

Voor de nacht

- 's Nachts kunt u het beste een urineopvangzak gebruiken.

Kleding

- Na de stoma-operatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat stomaproducten nooit in de zon liggen, want kleefstoffen kunnen smelten.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe sporten en gewichtheffen.
- Ledig het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.



Verwijderen van het opvangzakje

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak!
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangzakje Aanbrengen connector en urineopvangzak

4. Verwarm de huidplak tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie.
5. Vouw de huidplak dubbel. Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 tot 2 mm bedragen.
6. Modelleer de huidplak rondom de huid, zodat die goed aansluit op de huid.
7. Pak een losse connector uit de doos. Klik de connector op het uiteinde van het aftapkraantje. Sluit de urine- of nachtzak aan door de conus stevig in de connector te drukken. Draai het aftapkraantje open, zodat u aan de voorkant de goudkleurige druppel kunt zien.

Ervaar zelf wat Hollister voor u kan betekenen

De Hollister-opvangsystemen zijn speciaal ontwikkeld om de kwaliteit van leven te verbeteren. Als u een gratis proefpakket aanvraagt, kunt u zelf ervaren hoe praktisch de Hollister-producten in het dagelijks gebruik zijn.

Stuurt u mij een gratis proefpakket van:

- Moderma Flex Urostomie (1-delig)
- Moderma Flex Urostomie met flexibele plakrand (1-delig)
- Conform 2 Urostomie (2-delig)
- Conform 2 Urostomie met flexibele plakrand (2-delig)

Stuurt u mij informatie over:

- de praktische hulpmiddelen van Hollister

Ik ben akkoord met onderstaande privacy verklaring

Uw privacy is van belang voor Hollister (Hollister is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "Hollister"). Hollister respecteert uw privacyrechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Lees u deze Privacy Statement aandachtig goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens die door Hollister worden verzameld kunnen contactinformatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby's, geslacht, leeftijd, productvoorkeuren en leveringslijst omvatten. Hollister kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Hollister en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement, wordt de informatie die u aan ons verschaft, gebruikt voor de volgende doeleinden: om u te informeren over nieuwe producten, distributiepartners en andere aanbiedingen; om u te helpen bij het kiezen van een product; om u te voorzien van Hollister producten voor de behandeling van uw aandoening. Hollister zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Hollister verzamelt, kunnen worden opgeslagen in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Hollister. Indien u niet langer meldingen van Hollister, of derde partijen op verzoek van Hollister, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Hollister door te bellen met 0800 520352, maandag tot en met donderdag van 08:30 tot 17:00 uur en op vrijdag van 8:30 tot 15:00 uur, of door een email te sturen aan klantenservice@hollister.com.

Naam:	M/V
Adres:	
Postcode/plaats:	
Telefoon:	
E-mail:	
Mijn stomamaat is:	mm
Ik gebruik nu:	

U kunt deze antwoordkaart ook in een ongefrankeerde envelop sturen naar: Hollister bv, Antwoordnummer 397, 3800 GE Amersfoort