

# Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

*De juiste keuze*

Veilig  
Hygiënisch  
Praktisch

 Hollister



Veilig werken met endotracheale tubes  
Optimaliseren van de mondzorg  
Beschermen van de huid

# Anchor Fast

## Oral Endotracheal Tube Fastener

Anchor Fast is een oraal endotracheaal fixatiesysteem met unieke eigenschappen. Daarmee is het de juiste keus voor een veelzijdige, protocollaire aanpak van mondzorg. Anchor Fast helpt de vorming van lipzweren<sup>1,2</sup> te voorkomen en vergemakkelijkt de toegang tot de mondholte. Het draagt daardoor bij aan een optimale mondzorg. Wetenschappelijk is vastgesteld dat toepassing van een integraal protocol voor mondzorg en tandheelkundige zorg de kans op beademingspneumonie tijdens endotracheale intubatie vermindert.

### Eenvoudig te gebruiken

#### 1. plaatsen

Plaats de niet-absorberende stabilisator op de bovenlip, zodat die rust op de huid tussen neus en lip. Plaats vervolgens de huidbeschermers op de wangen.

#### 2. vastmaken

Dankzij de huls met antislip-grijpers en de veiligheidsklem – één klik volstaat – is de endotracheale tube veilig verankerd.

#### 3. positioneren

Breng de tubeshuttle op de juiste positie; verander de positie voor optimale mondzorg en om de druk te verminderen.



Tube-huls met antislip-grijpers



Eenkliks-veiligheidsklem




Verschuifbare tubeshuttle



## Minder beademingspneumonie dankzij geavanceerde orale en dentale zorg

In een onafhankelijke studie\* is vastgesteld dat het gebruik van geavanceerde instrumenten in combinatie met de consequente toepassing van een integraal protocol voor mondzorg significant bijdraagt aan vermindering van het aantal gevallen van beademingspneumonie en de daaraan verbonden kosten.

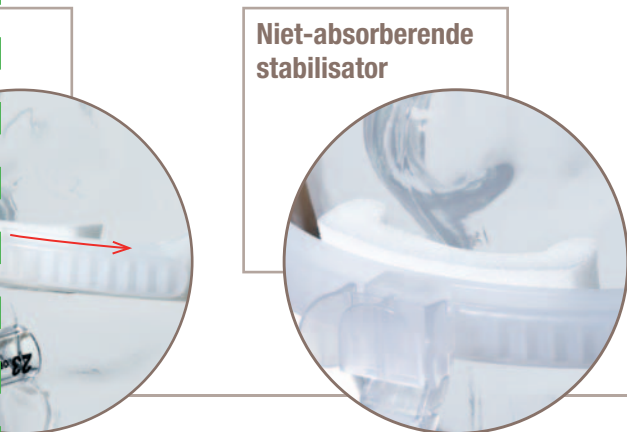

### Producteigenschappen

**Met de verschuifbare tubeshuttle** kan de endotracheale tube gemakkelijk naar beide zijden worden verplaatst, terwijl de tube veilig in de huls verankerd blijft.

**De huls met antislip-grijpers** voorkomt onbedoelde bewegingen van de tube.

**De eenkliks-veiligheidsklem** bevestigt de tube veilig op zijn plaats. Met één klik kan men de tube losmaken en vervolgens verplaatsen.

**De niet-absorberende stabilisator voor de bovenlip** houdt de tube opgetild van de lip, wat helpt om de druk op de mond te verlichten of ongedaan te maken. De stabilisator voorkomt tevens overmatige vochtvorming die tot huidbeschadiging kan leiden.

**De huidbeschermers** bevestigen het systeem stevig op zijn plaats. Dankzij hun unieke samenstelling zijn de huidbeschermers zacht voor de huid en gemakkelijk aan te brengen en te verwijderen. Bovendien zijn ze vochtbestendig, wat voorkomt dat het systeem uit positie raakt.

**De verstelbare nekband** biedt extra bescherming tegen mogelijke extubatie en is vervangbaar.

Art. nummer	Omschrijving	Verpakt per
9799	Anchor Fast tubefixatiesysteem	12
9788	Anchor Fast vervangende nekbanden	4

\* Fixatiesystemen voor endotracheale tubes waren geen onderwerp van de studie.

# Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

**Wilt u meer weten over de fixatiesystemen van Hollister?**

**Bel dan 0800 02 303 52 of mail naar [klantenservice@hollister.com](mailto:klantenservice@hollister.com)**

1. Veneman W, Adams-Stubbs D. (2010) An Alternative Approach to Prevent Lip Pressure Ulcers in the Intubated Patient. Gepresenteerd tijdens het Symposium on Advanced Wound Care. 17-20 april 2010, Orlando, Florida. Wade Veneman, RCP, RRT and Debbie Adams-Stubbs, RCP, RRT. Community Regional Medical Center, Fresno, CA USA. (2008-2010) Aantal proefpersonen: onbekend, observationele studie over alle patiënten die van november 2008 tot februari 2010 beademd zijn.
2. Miller K, Fenstermaker C, Limoge D, Leshko R, Lutz A, Morgan G, Cornman L. (2009) A Utilization of Anchor Fast Oral Endotracheal Tube Fastener to Reduce the Incidence of Lip Ulcers. Gepresenteerd tijdens het 55e International Respiratory Congress, 5-8 december 2009, San Antonio, Texas. Kenneth Miller MEd, RRT-NPS, Chris Fenstermaker, BS, RRT-NPS, Diane Limoge CCRN, Robert Leshko BS, RRT, Angela Lutz, BS, RRT-NPS, Georigiann Morgan, Linda Cornman, BS, RRT-NPS. Lehigh Valley Health Network, Bethlehem, PA USA (2008-2009). Aantal proefpersonen: onbekend, observationele studie over alle patiënten die van januari 2008 tot december 2008 beademd zijn.
3. Garcia R, Jendresky L, Colbert L, Bailey A, Zaman M, and Majumder M. Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study. American Journal of Critical-Care. 2009. <http://www.ajconline.org>

The logo for Hollister, featuring a stylized white cross-like symbol to the left of the word "Hollister" in a white serif font, all set against a red background.

**Hollister bv**  
Postbus 2662  
3800 GE Amersfoort

Tel: (033) 45 01 000  
[klantenservice@hollister.com](mailto:klantenservice@hollister.com)  
[www.hollister.nl](http://www.hollister.nl)

#### Het complete aanbod van Hollister fixatiesystemen

De hoogwaardige fixatiesystemen van Hollister zijn zorgvuldig afgestemd op de behoeften van patiënten en professie.

