


Moderma Flex[®] Colostoma

Eéndelig opvangsysteem
met vlakke en convexe
huidplak

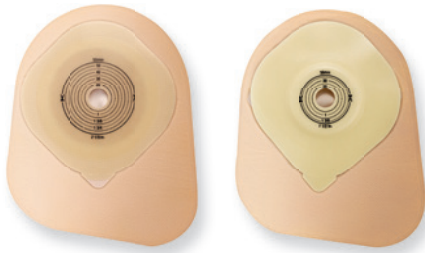



U kunt er elke dag op vertrouwen

- Huidvriendelijke opvangzakjes
- Ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- Nagenoeg onzichtbaar onder kleding (ultraplat systeem!)
- * Minder opbollen en geurtjes door AF300 filter
- Discreet dankzij de ritselvrije opvangzakjes
- Flexibel bij elke lichaamsbeweging
- Voldoende opvangcapaciteit

Praktische tips

Op Moderma Flex colostomamateriaal kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5 - 2 l per dag.

Kleding


- Na de stomaoperatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangmateriaal is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een iets wijdere zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat opvangmateriaal nooit in de zon liggen, dit kan nadelige effecten hebben op de plakkracht en werking van de huidplak.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe en zware sporten.
- Leeg het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.

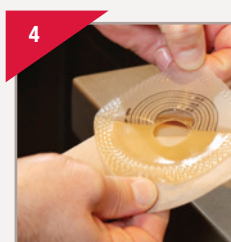

Verwijderen van het opvangmateriaal

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het afvalzakje.
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaartje kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangmateriaal

4. Maak de huidplak zo soepel mogelijk door deze voor te verwarmen tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie.
5. Vouw de huidplak dubbel en breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1 -2 mm bedragen. Modelleer de huidplak rondom de stoma, zodat die goed aansluit op de huid.
6. Houd na het aanbrengen ong. 30 seconden uw hand op het opvangmateriaal voor een goede hechting.

Overzicht

productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat code per

Moderma Flex CeraPlus*®

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
52100	midi	15-55 mm	30	
52125	midi	25 mm	30	
52130	midi	30 mm	30	
52135	midi	35 mm	30	

Convex

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
52600	midi	15-38 mm	30	
52601	midi	15-51 mm	30	
52625	midi	25 mm	30	
52630	midi	30 mm	30	
52635	midi	35 mm	30	

Moderma Flex SoftFlex®

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak

▼beige 	▼transparant			
42100	midi, QuietWear™	15-55 mm	30	
42120	midi, QuietWear	20 mm	30	
42125	midi, QuietWear	25 mm	30	
42130	midi, QuietWear	30 mm	30	
42135	midi, QuietWear	35 mm	30	
42140	midi, QuietWear	40 mm	30	
42145	midi, QuietWear	45 mm	30	
42300	maxi, QuietWear	15-55 mm	30	
42325	maxi, QuietWear	20 mm	30	
42330	maxi, QuietWear	30 mm	30	
42335	maxi, QuietWear	35 mm	30	

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
22100	2214055	22500	midi	15-55 mm 30
22120			midi	20 mm 30
22125			midi	25 mm 30
22130			midi	30 mm 30
22135			midi	35 mm 30
22140			midi	40 mm 30
22145			midi	45 mm 30
22300	2234055	22400	maxi	15-55 mm 30
22325			maxi	25 mm 30
22330			maxi	30 mm 30
22335			maxi	35 mm 30

productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat code per

Moderma Flex SoftFlex® (vervolg)

Convex

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak

▼beige 	▼transparant			
42800	maxi, QuietWear™	15-38 mm	30	
42801	maxi, QuietWear	15-51 mm	30	
42820	maxi, QuietWear	20 mm	30	
42825	maxi, QuietWear	25 mm	30	
42830	maxi, QuietWear	30 mm	30	
42835	maxi, QuietWear	35 mm	30	

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
22800	2283038	22900	maxi	15-38 mm 30
22801	2283051	22901	maxi	15-51 mm 30
22820	2283120	22920	maxi	20 mm 30
22825	2283125	22925	maxi	25 mm 30
22830	2283130	22930	maxi	30 mm 30
22835	2283135	22935	maxi	35 mm 30

Soft Convex

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
2261025		midi	15-25 mm	30
2261038		midi	15-38 mm	30
2261055		midi	15-55 mm	30
2261120		midi	20 mm	30
2261125		midi	25 mm	30
2261130		midi	30 mm	30
2261135		midi	35 mm	30
2261140		midi	40 mm	30
2281025		maxi	15-25 mm	30
2281038		maxi	15-38 mm	30
2281055		maxi	15-55 mm	30
2281120		maxi	20 mm	30
2281125		maxi	25 mm	30
2281130		maxi	30 mm	30
2281135		maxi	35 mm	30
2281140		maxi	40 mm	30

Ovaal

anatomisch, filter, zelf te knippen/voorgestanste huidplak,
kijkvenster (zie )

▼beige 	▼transparant			
42301		maxi, QuietWear	15-65x75 mm	30
22301	2234001	22401	maxi, ovaal	15-65x75 mm 30



*Op basis van Remois technologie
(Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd)

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo en CeraPlus zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.