

Conform 2[®] huidplak



Tweedelig opvangsysteem met
en zonder unieke
flexibele plakrand





Het opvangsysteem dat zich aan ú aanpast

- Volgt iedere beweging van de huid
- Optimale bewegingsvrijheid
- Comfortabel
- Discreet door ultra lage flens
- Bijzonder huidvriendelijk

Praktische tips

Op Conform 2 stomamateriaal kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5- 2 l per dag.

Kleding




- Na de stomaoperatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangmateriaal is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een wijde zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat opvangmateriaal nooit in de zon liggen, dit kan nadelige effecten hebben op de plakkracht en werking van de huidplak.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe en zware sporten.
- Leeg het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.

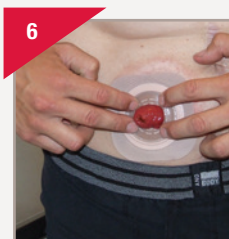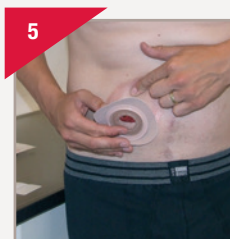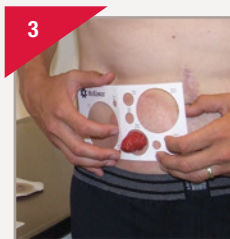

Verwijderen van het opvangmateriaal

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooiden in het afvalzakje.
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangmateriaal

4. Maak de huidplak zo soepel mogelijk door deze voor te verwarmen tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie. Vouw een hoekje in de tweestripsbeschermfolie, zodat u later de beschermstrips eenvoudig kunt verwijderen.
5. Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1-2 mm bedragen.
6. Verwijder aan beide zijden de beschermstrips van de huidplak en plak de flexibele plakrand vast. LET OP: Zorg dat deze flexibele plakrand zonder spanning op de buikwand wordt aangebracht.
7. Klik de ring van het opvangzakje op de flens van de huidplak. Als extra check kunt u licht aan het opvangzakje trekken; zo weet u helemaal zeker dat het goed vastzit.

Overzicht

productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat maat code per

Conform 2® huidplak met/zonder flex. plakrand CeraPlus®

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen

▼ zonder flexibele plakrand

14500	14200	13-30 mm	45 mm	● 10
15500	15200	13-40 mm	55 mm	● 10
17500	17200	13-55 mm	70 mm	● 10

Convex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

▼ zonder flexibele plakrand

14600	14100	13-25 mm	45 mm	● 10
14620		20 mm	45 mm	● 10
14625		25 mm	45 mm	● 10
15600	15100	13-38 mm	55 mm	● 10
15629		29 mm	55 mm	● 10
15632		32 mm	55 mm	● 10
17600	17100	13-51 mm	70 mm	● 10

Conform 2 huidplak SoftFlex®

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

23200		13-20 mm	35 mm	● 5
24200		13-30 mm	45 mm	● 5
24220		20 mm	45 mm	● 5
24225		25 mm	45 mm	● 5
24230		30 mm	45 mm	● 5
25200		13-40 mm	55 mm	● 5
25235		35 mm	55 mm	● 5
25240		40 mm	55 mm	● 5
27200		13-55 mm	70 mm	● 5

Conform 2 huidplak met flexibele plakrand FormaFlex®

huidplak met zwevende flens, zelf te vormen

34700	vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	● 5
35700	vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	● 5
37700	vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	● 5

productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat maat code per

Conform 2 huidplak uro FlexWear®

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

33200		13-20 mm	35 mm	● 5
34200		13-30 mm	45 mm	● 5
34225		25 mm	45 mm	● 5
34230		30 mm	45 mm	● 5
35200		13-40 mm	55 mm	● 5
35235		35 mm	55 mm	● 5
35240		40 mm	55 mm	● 5

Convex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

24300		13-25 mm	45 mm	● 5
24320		20 mm	45 mm	● 5
24322		22 mm	45 mm	● 5
24325		25 mm	45 mm	● 5
25300		13-38 mm	55 mm	● 5
25329		29 mm	55 mm	● 5
25332		32 mm	55 mm	● 5
25335		35 mm	55 mm	● 5
27300		13-51 mm	70 mm	● 5

Conform 2 huidplak met flexibele plakrand FlexWear®

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

33500		13-20 mm	35 mm	● 5
34500		13-30 mm	45 mm	● 5
34520		20 mm	45 mm	● 5
34525		25 mm	45 mm	● 5
34530		30 mm	45 mm	● 5
35500		13-40 mm	55 mm	● 5
35535		35 mm	55 mm	● 5
35540		40 mm	55 mm	● 5
37500		13-55 mm	70 mm	● 5

Convex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/
voorgestanst

34600		13-25 mm	45 mm	● 5
34620		20 mm	45 mm	● 5
34622		22 mm	45 mm	● 5
34625		25 mm	45 mm	● 5
35600		13-38 mm	55 mm	● 5
35629		29 mm	55 mm	● 5
35632		32 mm	55 mm	● 5
37600		13-51 mm	70 mm	● 5



*Op basis van Remois technologie
(Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd)

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo en CeraPlus zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.