

Conform 2[®] Urostoma



Tweedelig opvangsysteem met
vlakke en convexe huidplak





U kunt er elke dag op vertrouwen

- Huidvriendelijke opvangzakjes
- Ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- Nagenoeg onzichtbaar onder kleding (ultraplat systeem!)
- Het afvoerkraantje is gemakkelijk te bedienen
- Flexibel bij elke lichaamsbeweging
- Makkelijk te legen
- Voldoende opvangcapaciteit

Praktische tips

Op Conform 2 Urostoma kunt u elke dag vertrouwen.

Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Drink voldoende: 1,5- 2 l per dag.

Voor de nacht

- 's Nachts kunt u het beste uw opvangsysteem (of stomazakje) door-koppelen aan een urineopvangzak.

Kleding





- Na de stomaoperatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangzakje is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een iets wijdere zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat opvangmateriaal nooit in de zon liggen, dit kan nadelige effecten hebben op de plakkracht en werking van de huidplak.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
 - Vermijd extreem ruwe en zware sporten.
 - Leeg het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
-

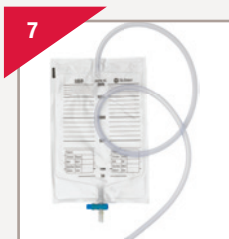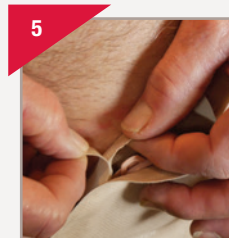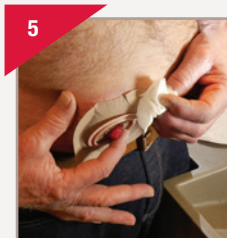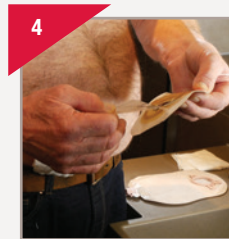

Verwijderen van het opvangmateriaal

1. Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het afvalzakje.
2. Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
3. Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangmateriaal

4. Maak de huidplak zo soepel mogelijk door deze voor te verwarmen tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie.
5. Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag 1-2 mm bedragen. Modelleer de huidplak rondom de stoma, zodat die goed aansluit op de huid.
6. Bevestig het opvangzakje op de flens van de huidplak en houd na het aanbrengen ong. 30 seconden uw hand op het opvangmateriaal voor een goede hechting.

Aanbrengen connector en urineopvangzak

7. Pak een los tussenstukje uit de doos. Klik het tussenstukje op het uiteinde van het afvoerkraantje. Sluit de urine- of nachtzak aan door de conus stevig in het tussenstukje te drukken. Draai het afvoerkraantje open, zodat u aan de voorkant de druppel kunt zien.

Overzicht

ref. productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat code per

Conform 2[®] huidplak met/zonder flex. plakrand CeraPlus[®]

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen

▼ zonder flexibele plakrand

14500	14200	13-30 mm	45 mm	● 10
15500	15200	13-40 mm	55 mm	● 10
17500	17200	13-55 mm	70 mm	● 10

Convex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

▼ zonder flexibele plakrand

14600	14100	13-25 mm	45 mm	● 10
14620		20 mm	45 mm	● 10
14625		25 mm	45 mm	● 10
15600	15100	13-38 mm	55 mm	● 10
15629		29 mm	55 mm	● 10
15632		32 mm	55 mm	● 10
17600	17100	13-51 mm	70 mm	● 10

Conform 2[®] huidplak met/zonder flex. plakrand FlexWear[®]

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

▼ zonder flexibele plakrand

33500	33200	13-20 mm	35 mm	● 5
34500	34200	13-30 mm	45 mm	● 5
34520		20 mm	45 mm	● 5
34525	34225	25 mm	45 mm	● 5
34530	34230	30 mm	45 mm	● 5
35500	35200	13-40 mm	55 mm	● 5
35535	35235	35 mm	55 mm	● 5
35540	35240	40 mm	55 mm	● 5
37500		13-55 mm	70 mm	● 5

Convex

huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst

▼ zonder flexibele plakrand

34600	24300	13-25 mm	45 mm	● 5
34620	24320	20 mm	45 mm	● 5
34622	24322	22 mm	45 mm	● 5
34625	24325	25 mm	45 mm	● 5
35600	25300	13-38 mm	55 mm	● 5
35629	25329	29 mm	55 mm	● 5
35632	25322	32 mm	55 mm	● 5
	25335	35 mm	55 mm	● 5
37600	27300	13-51 mm	70 mm	● 5

ref. productomschrijving stomamaat flens- kleur- verp.
maat code per

Conform 2[®] huidplak FormaFlex[®]

huidplak met zwevende flens, zelf te vormen

34700	Vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	● 5
35700	Vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	● 5
37700	Vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	● 5

Conform 2[®] zakjes

Urostoma

met compartimenten en zacht afvoerkaantje

▼ beige ▼ transparant

23790	23890	midi	35 mm	● 20
24790	24890	midi	45 mm	● 20
25790	25890	midi	55 mm	● 20
	27890	midi	70 mm	● 20

zonder compartimenten, symmetrisch

▼ beige ▼ transparant

23730	23830	midi	35 mm	● 20
24730	24830	midi	45 mm	● 20
25730	25830	midi	55 mm	● 20
	27830	midi	70 mm	● 20

Nachtzak

5550	Hollister URO nachtzak (2 liter)	doos	10
7331	Tussenstukje urostomiezak	doos	10



*Op basis van Remois technologie
(Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd)

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo en CeraPlus zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.