


Conform 2[®] Colostoma

Tweedelig opvangsysteem
met vlakke en convexe
huidplak

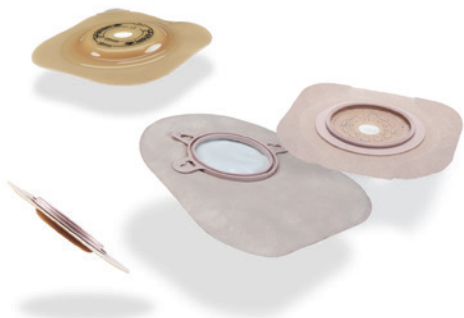



Nog meer flexibiliteit en zekerheid

- Huidvriendelijke opvangzakjes
- Ontziet de huid dankzij de unieke huidplaktechnologie
- Minder opbollen en geurtjes door AF300 filter
- Discreet dankzij de ritselvrije opvangzakjes
- Flexibel bij elke lichaamsbeweging
- Voldoende opvangcapaciteit

Praktische tips

Op Conform 2 colostomamateriaal kunt u elke dag vertrouwen. Onderstaande tips kunnen u bij het dagelijks gebruik van pas komen.

Voeding

- Eet gevarieerde, uitgebalanceerde voeding.
- Eet langzaam en kauw het voedsel goed.
- Breid het 'menu' geleidelijk aan uit. Dat is gewoon een kwestie van proeven: probeer een nieuw gerecht en kijk hoe het uitwerkt op uw spijsvertering.
- Drink voldoende, ook bij diarree: 1,5- 2 l per dag.

Kleding





- Na de stomaoperatie kunt u gewoon weer uw favoriete kleding dragen. Wat u ook draagt, het opvangmateriaal is nagenoeg onzichtbaar.
- Zwemkleding voor dames: u kunt het beste een badpak met verschillende motieven en kleuren dragen.
- Zwemkleding voor heren: u kunt het beste een iets wijdere zwembroek dragen.

Werken en vakantie

- Neem altijd extra opvangmateriaal mee, bijvoorbeeld in een handtas of de binnenzak van een colbert.
- Laat opvangmateriaal nooit in de zon liggen, dit kan nadelige effecten hebben op de plakkracht en werking van de huidplak.
- Zorg dat er op uw werk een afvalbak bij het toilet staat.

Lichaamsbeweging

- U kunt gewoon bewegen.
- Vermijd extreem ruwe en zware sporten.
- Leeg het opvangzakje voordat u gaat zwemmen of sporten.
- Door het AF300 filter is een afplaksticker niet nodig als u gaat zwemmen of een sauna bezoekt.

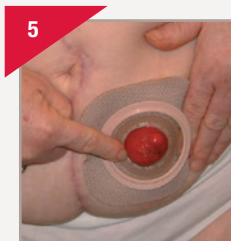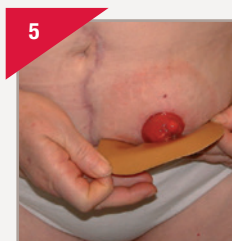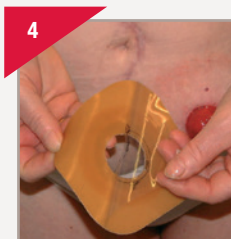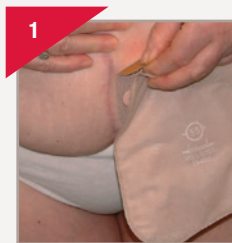

Verwijderen van het opvangmateriaal

- 1.** Verwijder de huidplak van boven naar beneden, eventueel met behulp van een vochtig gaasje of vochtig toiletpapier. Zo laat de huidplak gemakkelijker los. Duw de huid los van de huidplak en ondersteun de huid. Trek nooit aan de huidplak! De huidplak en het opvangzakje kunt u weggooien in het afvalzakje.
- 2.** Maak de huid rondom de stoma schoon met vochtige gaasjes of vochtig toiletpapier. Droog de huid door te deppen met een gaasje of toiletpapier. Eventuele huidplakresten kunt u laten zitten; deze verdwijnen vanzelf na de volgende wisseling van het opvangmateriaal.
- 3.** Maakt u gebruik van een huidplak die u zelf op maat kunt knippen? Bepaal dan eerst de juiste maat voor de opening in de huidplak. Gebruik daarvoor zo nodig een stomamal. Met een gebogen schaar kunt u vervolgens langs deze stomamal de huidplak op maat knippen.

Aanbrengen van het opvangmateriaal

- 4.** Maak de huidplak zo soepel mogelijk door deze voor te verwarmen tussen de handen of onder de kleding. Verwijder vervolgens de beschermfolie.
- 5.** Breng de huidplak van onder naar boven aan. De ruimte tussen de stoma en de huidplak mag maximaal 1-2 mm bedragen. Modelleer de huidplak rondom de stoma, zodat die goed aansluit op de huid.
- 6.** Klik de ring van het opvangzakje op de flens van de huidplak. Als extra check kunt u licht aan het opvangzakje trekken; zo weet u helemaal zeker dat het goed vastzit. Houd na het aanbrengen ong. 30 seconden uw hand op het opvangmateriaal voor een goede hechting.

Overzicht

productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
Conform 2® huidplak met en zonder flexibele plakrand CeraPlus® *Remois is een technologie van Alcare Co., Ltd					Conform 2 met flexibele plakrand FlexWear®				
huidplak met zwevende flens, zelf te knippen ▼zonder flexibele plakrand					huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst				
14500	14200	13-30 mm	45 mm	● 10	33500	13-20 mm	35 mm	● 5	
15500	15200	13-40 mm	55 mm	● 10	34500	13-30 mm	45 mm	● 5	
17500	17200	13-55 mm	70 mm	● 10	34520	20 mm	45 mm	● 5	
Convex					34525	25 mm	45 mm	● 5	
huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst ▼zonder flexibele plakrand					34530	30 mm	45 mm	● 5	
14600	14100	13-25 mm	45 mm	● 10	35500	13-40 mm	55 mm	● 5	
14620		20 mm	45 mm	● 10	35535	35 mm	55 mm	● 5	
14625		25 mm	45 mm	● 10	35540	40 mm	55 mm	● 5	
15600	15100	13-38 mm	55 mm	● 10	37500	13-55 mm	70 mm	● 5	
15629		29 mm	55 mm	● 10	Convex				
15632		32 mm	55 mm	● 10	huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst				
17600	17100	13-51 mm	70 mm	● 10	34600	13-25 mm	45 mm	● 5	
Conform 2 huidplak SoftFlex®					34620	20 mm	45 mm	● 5	
huidplak met zwevende flens, zelf te knippen/voorgestanst					34622	22 mm	45 mm	● 5	
23200		13-20 mm	35 mm	● 5	34625	25 mm	45 mm	● 5	
24200		13-30 mm	45 mm	● 5	35600	13-38 mm	55 mm	● 5	
24220		20 mm	45 mm	● 5	35629	29 mm	55 mm	● 5	
24225		25 mm	45 mm	● 5	35632	32 mm	55 mm	● 5	
24230		30 mm	45 mm	● 5	37600	13-51 mm	70 mm	● 5	
25200		13-40 mm	55 mm	● 5	huidplak post-operatief, zelf te knippen géén startopening				
25235		35 mm	55 mm	● 5	38500	0-89 mm	102 mm	● 5	
25240		40 mm	55 mm	● 5					
27200		13-55 mm	70 mm	● 5					
Conform 2 huidplak met flexibele plakrand FormaFlex®									
34700	Vormbare huidplak	16-32 mm	45 mm	● 5					
35700	Vormbare huidplak	16-43 mm	55 mm	● 5					
37700	Vormbare huidplak	16-57 mm	70 mm	● 5					

productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per	productomschrijving	stomamaat	flens- maat	kleur- code	verp. per
---------------------	-----------	----------------	----------------	--------------	---------------------	-----------	----------------	----------------	--------------

Conform 2® colostomazakjes

anatomisch, filter

▼beige	▼transparant			
44410	Mini, QuietWear	45 mm	●	30
44400	Midi, QuietWear	45 mm	●	30
44420	Maxi, QuietWear	45 mm	●	30
45410	Mini, QuietWear	55 mm	●	30
45400	Midi, QuietWear	55 mm	●	30
45420	Maxi, QuietWear	55 mm	●	30
47400	Midi, QuietWear	70 mm	●	30
47420	Maxi, QuietWear	70 mm	●	30

anatomisch, filter

▼beige	▼transparent				
24410		mini	45 mm	●	30
24400	24500	midi	45 mm	●	30
24420	24520	maxi	45 mm	●	30
25410		mini	55 mm	●	30
25400	25500	midi	55 mm	●	30
25420	25520	maxi	55 mm	●	30
27410		mini	70 mm	●	30
27400	27500	midi	70 mm	●	30
27420	27520	maxi	70 mm	●	30

Wilt u meer weten?

Onze mensen staan klaar om uw vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven. U kunt gratis bellen naar: 0800 02 303 52.

Hollister bv

Postbus 2662
3800 GE Amersfoort
Tel: (033) 45 01 000
klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over het beoogde gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies voor gebruik. Niet alle producten zijn CE-gemarkeerd. Het Hollister-logo en CeraPlus zijn handelsmerken van Hollister Incorporated. Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars.

