

Gebruikshandleiding VaPro™ katheters




1. Leg alle benodigdheden klaar en bereid het gebied voor.

2. Was uw handen zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.


3. Neem een geschikte houding aan voor het uitvoeren van de intermitterende katheterisatie. Maak uw kleding los of verwijder deze zodat u toegang heeft tot uw geslachtsdelen.



4. Om de verpakking te openen, trekt u de vingeropening naar u toe en naar beneden. Leg de katheterverpakking op uw schoot, wasbak of een ander vlak oppervlak.

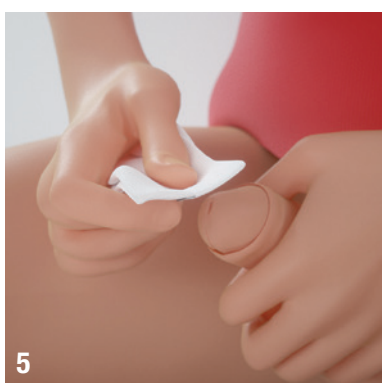


5. Houd de penis vast met uw niet-dominante hand en blijf deze vasthouden tot u klaar bent met katheteriseren. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug en reinig de eikel zoals aangeleerd door uw zorgverlener.

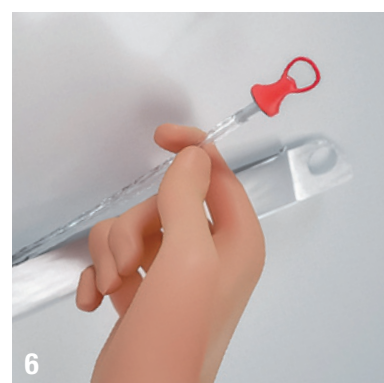

6. Haal de katheter uit de verpakking.

7. Verwijder het ringdopje van de beschermende inbrengtip van de katheter.

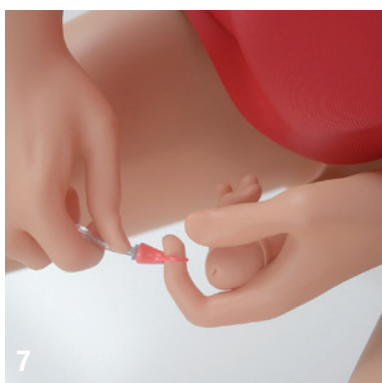

8. Houd de katheter in de ene hand, en schuif met de andere de katheter tot vooraan in de beschermende inbrengtip. Zorg ervoor dat de katheter niet uit de beschermende inbrengtip steekt.



9. Pak de katheter vast onderaan de beschermende inbrengtip.

VaPro™

No Touch Intermitterende Katheter



10. Knijp met de duim en wijsvinger van uw niet-dominante hand zacht in de eikel om de urinebuis meer te openen. Breng met uw dominante hand de beschermende inbrengtip in tot het plaatje in contact komt met de opening van de urinebuis.



11. Houd de penis rechtop en breng de katheter in tot de urine begint te stromen.



12. Zodra de urinestroom is gestopt, trekt u de katheter langzaam terug. Als de urine opnieuw gaat stromen, wacht u even met terugtrekken tot de urinestroom stopt. Verwijder de katheter volledig wanneer u er zeker van bent dat de blaas leeg is. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug naar voren.



13. Gooi de katheter en de verpakking in een afvalbak. NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.

14. Was uw handen.

WAARSCHUWINGEN:

Om de kans op infecties of andere complicaties te verkleinen, het product niet hergebruiken.

Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden, stopt u met het gebruik van de katheter en brengt u uw zorgverlener op de hoogte.

INDICATIES VOOR GEBRUIK

Deze intermitterende katheter is een flexibel slangvormig hulpmiddel dat door de urinebuis ingebracht wordt bij mannen, vrouwen en kinderen bij wie urine uit de blaas gehaald moet worden.

VOORZORGSMATREGELEN: Neem contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt, wanneer een van de volgende problemen zich voordoet:

- Gevoelige plasbuis
- Onverklaarbare bloeding uit de urinebuis
- Overduidelijke stricturen
- Foutieve passage
- Urethritis – ontsteking van de plasbuis
- Prostatitis – ontsteking van de prostaat
- Epididymitis – ontsteking van de bijbal (zaadballeider)

Voor het zelf inbrengen van een katheter dient u altijd het zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen, die uitsluitend mogen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Omdat de katheterisatiefrequentie van persoon tot persoon varieert, dient de aanbevolen frequentie voor uw katheterisatie door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor andere vragen over uw katheterisatie contact op met uw zorgverlener.

LET OP: Berg de dozen bij voorkeur op in een horizontale positie bij kamertemperatuur.

Niet gemaakt van latex. Intermitterende katheter is niet gemaakt van PVC of ftalaten. Dit product bestaat uit: polyurethaan sleeve, thermoplastisch elastomeer uiteinde en slang.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing voor informatie over beoogd gebruik, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies. Uitsluitend op voorschrift.

Hollister bv

0800 - 52 30 352

klantenservice@hollister.com

www.hollister.nl